

Clearblue

DIGITAL

Schwangerschaftstest

• Clearblue DIGITAL ist bei Anwendung ab dem **Fälligkeitstag der Periode zu über 99% zuverlässig.***

• Clearblue DIGITAL kann bis zu 4 Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode angewendet werden†.


Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, bevor Sie den Test durchführen.

1 Durchführen des Tests

Wenn Sie ab dem Fälligkeitstag der Periode testen, können Sie den Test zu jeder Tageszeit durchführen.

Wenn Sie vor Fälligkeit Ihrer Periode testen, verwenden Sie hierfür den Morgenurin.

- Wenn Sie für den Test bereit sind, nehmen Sie das Teststäbchen aus der Schutzfolie und ziehen die blaue Kappe ab. Verwenden Sie das Teststäbchen sofort.
- Halten Sie das Teststäbchen während der Durchführung **niemals** mit der saugfähigen Testspitze nach oben.

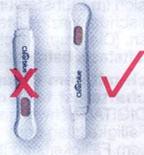

ENTWEDER SIE FÜHREN DEN TEST IM URINSTRAHL DURCH

ODER

SIE FANGEN EINE URINPROBE IN EINEM SAUBEREN, TROCKENEN BEHÄLTER AUF


- Halten Sie das Teststäbchen mit der saugfähigen Spitze nach unten **genau 5 Sekunden lang** in Ihren Urinstrahl.
- Achten Sie darauf, dass der Rest des Teststäbchens dabei nicht nass wird.
- Halten Sie auch nach der Benetzung die saugfähige Spitze nach unten gerichtet oder legen Sie das Teststäbchen flach hin, bis das Ergebnis angezeigt wird.
- Sie können die Schutzkappe wieder aufsetzen.



- Halten Sie das Teststäbchen wie abgebildet mit der saugfähigen Spitze nach unten genau **20 Sekunden lang** in den Urin.

- Halten Sie die saugfähige Spitze auch danach immer nach unten gerichtet oder legen Sie das Teststäbchen flach hin, bis das Ergebnis angezeigt wird.

- Sie können die Schutzkappe wieder aufsetzen.

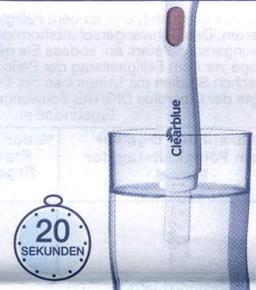

2 BITTE WARTEN SIE...

- Das Symbol „Warten“ beginnt zu blinken, um zu zeigen, dass der Test ausgewertet wird.
- Wenn das Symbol „Warten“ aufhört zu blinken, wird das Ergebnis angezeigt. Wenn das Symbol „Warten“ nicht erscheint, nachdem Sie den Test angewendet haben, **lesen Sie bitte Frage 5** in den Fragen und Antworten auf der Rückseite.



3 LESEN SIE IHR ERGEBNIS AB

- Innerhalb von **3 Minuten** wird das Ergebnis im Display angezeigt.
- Es kann vorkommen, dass das Ergebnis bereits nach 1 Minute angezeigt wird.
- Das Ergebnis bleibt ca. 24 Stunden im Display ablesbar.



Wird das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt, **lesen Sie bitte Frage 7** in den Fragen und Antworten.



Wird das Ergebnis „Nicht Schwanger“ angezeigt, **lesen Sie bitte Frage 8** in den Fragen und Antworten.



Fehlersymbol „Buch“



Fehler: leeres Display

TESTFEHLER

Bitte lesen Sie den umseitigen Abschnitt „Testfehler“, wenn Sie den Test durchgeführt haben und auf dem Display Folgendes angezeigt wird:

ENTSORGUNG DES CLEARBLUE DIGITAL SCHWANGERSCHAFTSTESTS

- Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Tests die Batterie aus dem Teststäbchen. Drücken Sie eine Münze in den Spalt auf der Rückseite des Teststäbchens. Brechen Sie den Plastikring auf.
- Entfernen Sie die Batterie und entsorgen Sie sie gemäß den entsprechenden Recycling-Vorschriften. **Warnung:** Batterien nicht öffnen, aufladen oder ins Feuer werfen. Nicht schlucken. Von Kindern fernhalten.
- Entsorgen Sie den Rest des Teststäbchens gemäß den geltenden Vorschriften für die Entsorgung von Elektronikgeräten.
- Elektronikgeräte nicht ins Feuer werfen.



FRAGEN UND ANTWORTEN

- Wie zuverlässig ist der Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest?**
Labortests haben gezeigt, dass der Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest bei Anwendung ab dem Fälligkeitstag der Periode zu über 99 % zuverlässig ist.
- Wie funktioniert der Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest?**
Wenn Sie schwanger sind, produziert Ihr Körper das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin). Die hCG-Konzentration in Ihrem Körper erhöht sich im Frühstadium der Schwangerschaft. Clearblue kann schon winzige Mengen dieses Hormons im Urin nachweisen. (Die Empfindlichkeit des Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstests beträgt 25mIU/ml.)
- Wann kann ich mit dem Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest testen?**
Der Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest kann bis zu 4 Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode angewendet werden. Wenn Sie vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen und das Ergebnis „Nicht Schwanger“ angezeigt wird, kann es sein, dass Sie trotzdem schwanger sind. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer klinischen Studie zum Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest in der Frühschwangerschaft.

Früh testen

Clearblue empfiehlt, erst ab dem Fälligkeitstag der Periode zu testen. Das Schwangerschaftshormon steigt in der frühen Schwangerschaft stark an, sodass Sie mit Clearblue bereits ab 4 Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode testen können. In klinischen Studien mit Urinproben der frühen Schwangerschaft zeigte der Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest folgende Ergebnisse an:

| Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode | % der Proben schwangerer Frauen, bei denen als Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird |
|--|--|
| -1 | 95% |
| -2 | 90% |
| -3 | 82% |
| -4 | 51% |

*Unipath, Bedford Großbritannien, Dezember 2005.

Um den Fälligkeitstag Ihrer Periode zu ermitteln, berechnen Sie Ihre gewöhnliche Zykluslänge, indem Sie die Tage vom ersten Tag einer Periode (Monatsblutung) bis zum Tag vor Beginn der nächsten Periode zählen.

- Wenn Sie unregelmäßige Zyklen haben, sollten Sie für den Test den längsten Zyklus der letzten Monate verwenden.
- Wenn Sie nicht wissen, wann Ihre Periode fällig ist, sollten Sie den Test frühestens 19 Tage nach dem letzten ungeschützten Geschlechtsverkehr durchführen.
- Wenn Sie ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen, können Sie den Test zu jeder Tageszeit durchführen. Wenn Sie vor Fälligkeit Ihrer Periode testen, verwenden Sie hierfür den Morgenurin. Nehmen Sie vor dem Test nicht übermäßig viel Flüssigkeit zu sich.
- Wenn das Ergebnis „Nicht Schwanger“ ist und Sie trotzdem glauben, dass Sie schwanger sind, lesen Sie bitte Frage 8.
- Können Arzneimittel oder Erkrankungen das Ergebnis beeinflussen?**
 - Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen der Arzneimittel, die Sie einnehmen, sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.
 - Fruchtbarkeitsfördernde Arzneimittel, die hCG enthalten, können das Ergebnis beeinträchtigen. (Diese Arzneimittel werden üblicherweise injiziert; wenn Sie zu früh nach der Behandlung testen, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird, obwohl Sie nicht schwanger sind.)
 - Andere fruchtbarkeitsfördernde Mittel (wie etwa Clomiphon), Schmerzmittel und hormonale Kontrazeptiva (wie die Pille) sollten das Ergebnis nicht beeinflussen.
 - Wenn Sie erst seit kurzem keine hormonalen Verhütungsmittel mehr einnehmen oder wenn Sie fruchtbarkeitsfördernde Mittel wie Clomiphon einnehmen, kann sich Ihre Zykluslänge verändert haben, sodass Sie möglicherweise zu früh testen.
 - Wenn Sie vor kurzem schwanger waren (auch wenn die Schwangerschaft nicht ausgetragen wurde), ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird, obwohl Sie nicht schwanger sind.
 - Eine ektoische Schwangerschaft, Zysten an den Eierstöcken, die Wechseljahre und einige sehr seltene Krankheiten können das Testergebnis verfälschen.
 - Wenn Sie das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben, kann sich evtl. später herausstellen, dass Sie nicht schwanger sind, da die Schwangerschaft im Frühstadium auf natürliche Weise beendet wurde.
- Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.
- Ich habe den Test durchgeführt, aber das Symbol „Warten“ wird nicht angezeigt. Was bedeutet das?**
Der Test wurde nicht korrekt durchgeführt. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Fehlersymbole“ weiter unten.
- Ich habe den Test durchgeführt, aber im Display wird kein Ergebnis angezeigt. Was bedeutet das?**
Das Ergebnis erscheint normalerweise innerhalb von 3 Minuten auf dem Display. Wenn kein Ergebnis angezeigt wird, lesen Sie bitte den Abschnitt „Fehlersymbole“ weiter unten.
- Was tue ich, wenn mir der Test anzeigt, dass ich schwanger bin?**
Wenn Ihr Ergebnis „Schwanger“ lautet, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen und mit ihm das weitere Vorgehen besprechen.
- Der Test zeigt das Ergebnis „Nicht Schwanger“ an. Was soll ich tun?**
Dies bedeutet, dass Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Schwangerschaft nicht festgestellt werden konnte, da die Konzentration des Schwangerschaftshormons noch nicht hoch genug war oder Sie möglicherweise den Fälligkeitstag Ihrer Periode falsch berechnet haben.
 - Wenn Sie früh getestet haben, testen Sie nochmals, wenn Ihre Periode fällig ist.
 - Wenn Ihre Periode überfällig ist, testen Sie in 3 Tagen nochmals. Wenn dieser Test ebenfalls das Ergebnis „Nicht Schwanger“ anzeigt und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, suchen Sie Ihren Arzt auf.

TESTFEHLER

Fehlersymbol „Buch“ - während des Tests ist ein Fehler aufgetreten. Es kann sein, dass:

- die saugfähige Testspitze nicht immer nach unten gehalten oder das Teststäbchen nach dem Benetzen mit Urin nicht flach hingelegt wurde.
 - zu viel oder zu wenig Urin aufgebracht wurde.
- Sie sollten den Test mit einem neuen Teststäbchen wiederholen und dabei die Anwendungshinweise genau beachten.

Fehler: leeres Display

Fehler: leeres Display - Wenn das Display nach der Durchführung des Tests leer bleibt, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an den Clearblue Beratungsservice.

*Unipath Limited, Bedford Großbritannien, Februa 2006.

www.clearblue.com

Beratungsservice
Beraterinnen sind montags bis freitags von 08:00-16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.

DE 08005 894 015* • AT 0820 001 148**

* Anrufe sind kostenlos. ** Anruferkosten werden zum Normaltarif berechnet und können vom Netzwerkanbieter abhängen. Bitte halten Sie die Chargennummer **LOT** bereit. Anrufe werden zur Trainings- und Qualitätskontrolle aufgezeichnet.

Angaben zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Der Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest ist für die Anwendung in einem elektromagnetischen Umfeld mit den unten angegebenen Merkmalen bestimmt. Der Kunde bzw. der Anwender des Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstests muss sicherstellen, dass das Produkt in einem entsprechenden Umfeld angewendet wird. Dieses Produkt wurde gemäß EN60601-1-2:2002 geprüft.

Für die Verwendung zu Hause.
Nur für die *In-vitro*-Diagnostik.
Bei Raumtemperatur aufbewahren.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Teststäbchen nur einmal verwenden.
Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist.
Teststäbchen nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Diese Anwendungshinweise gelten für das Modell Nummer 506080

Elektromagnetische Abstrahlung

Elektromagnetische Störfestigkeit

| Prüfung | Konformität | Elektromagnetisches Umfeld – Leitwerte | Prüfung | Konformitätsniveau | Elektromagnetisches Umfeld – Leitwerte |
|--|-------------|---|--|---|---|
| HF-Emissionen CISPR 11 | Gruppe 1 | Der Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest verwendet HF-Energie nur für interne Funktionen. Er weist daher extrem geringe HF-Emissionen auf. Störungen in der Nähe befindlicher elektronischer Geräte sind daher nicht zu erwarten. | Elektrostatistische Entladung IEC61000-4-2 | ±6 kV bei Kontakt ±8 kV in Luft | Fußböden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. In Räumen mit Bodenbelägen aus synthetischem Material sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen. |
| HF-Emissionen CISPR 11 | Klasse B | Der Clearblue DIGITAL Schwangerschaftstest ist zur Verwendung in allen Bereichen einschließlich häuslicher Bereiche geeignet. | HF-Feldstärke IEC61000-4-3*) | 3 V/m (Frequenzbereich 80 MHz bis 2,5 GHz) | d = 1,2√P im Bereich 80 MHz bis 800 MHz d = 2,3√P im Bereich 800 MHz bis 2,5 GHz wobei P der maximale Energiepegel des Senders in Watt und d der empfohlene Abstand vom Sender in Metern ist. |
| Anmerkung a) Diese Richtlinien treffen nicht auf alle Situationen zu. Die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst. | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|---------------|---|-----------------------|
| IVD | Medizinisches Produkt für die <i>In-vitro</i> -Diagnostik | LOT | Chargen-Code | ⊗ | Nicht wiederverwenden |
| ⊕ | Temperaturbegrenzung 2 °C-30 °C | ⏸ | Verwenden bis | 🏭 | Hersteller |