

Schwangerschaftstest Frühe Erkennung Digital

Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den Clearblue Schwangerschaftstest Frühe Erkennung Digital und sollte vor Gebrauch gelesen werden. Diese Verpackung enthält eine separate Gebrauchsanweisung für den Clearblue Schwangerschaftstest Schnell & Einfach, der an dem Aufdruck „PLUS“ auf der Folienverpackung zu erkennen ist.

- Über 99 % zuverlässig ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode.
- Kann bis zu 5 Tage vor dem Ausbleiben der Periode angewendet werden.
- **Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Test durchführen.**

1 Durchführung des Tests

WICHTIG

Halten Sie das Teststäbchen während der Durchführung **niemals** mit der saugfähigen Testspitze nach oben.



So ist es richtig ...



So nicht ...

Wenn Sie ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen, können Sie den Test zu jeder Tageszeit durchführen.

Wenn Sie vor Fälligkeit der Periode testen, verwenden Sie hierfür Morgenurin.

- Wenn Sie für den Test bereit sind, nehmen Sie das Teststäbchen aus der Folienverpackung und ziehen Sie die Kappe ab. Testen Sie unmittelbar danach.

ENTWEDER Sie testen in Ihrem Urinstrahl.

- Halten Sie die saugfähige Testspitze **nur 5 Sekunden** lang in den Urinstrahl.
- Achten Sie darauf, dass der übrige Teil des Teststäbchens trocken bleibt.
- Halten Sie die saugfähige Testspitze nach unten gerichtet, setzen Sie die Kappe wieder auf und legen Sie das Teststäbchen auf eine flache Unterlage.



ODER

Fangen Sie eine Urinprobe in einem sauberen, trockenen Behälter auf

- Tauchen Sie die saugfähige Testspitze, wie gezeigt, **20 Sekunden lang (nicht länger)** in den Urin.
- Halten Sie die saugfähige Testspitze nach unten gerichtet, setzen Sie die Kappe wieder auf und legen Sie das Teststäbchen auf eine flache Unterlage.



2 Clearblue Smart Countdown

- Der Smart Countdown wird jetzt auf dem Display angezeigt, um zu bestätigen, dass der Test auswertet. Die einzelnen Segmente erscheinen nacheinander, um den Fortschritt des Tests anzuzeigen.




Smart Countdown

- Wenn der Smart Countdown nach Verwendung des Tests nicht angezeigt wird, lesen Sie Frage 5.

3 Ablesen der Ergebnisse

- Wenn der Smart Countdown beendet ist, verschwindet er vom Display und das Testergebnis wird angezeigt.
- Dies dauert maximal 3 Minuten. In einigen Fällen kann das Ergebnis auch schon nach 1 Minute angezeigt werden.
- Das Ergebnis „Schwanger“ bleibt bis zu 6 Monate auf dem Display ablesbar.
- Das Ergebnis „Nicht Schwanger“ bleibt ca. 24 Stunden auf dem Display ablesbar.

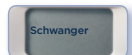

Wenn Sie das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben, lesen Sie Frage 9.



Wenn Sie das Ergebnis „Nicht Schwanger“ erhalten haben, lesen Sie Frage 10.

Fragen und Antworten

1 Wie zuverlässig ist Clearblue?

Labortests haben gezeigt, dass dieser Test ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode zu über 99 % zuverlässig ist.

2 Wie funktioniert Clearblue?

Wenn Sie schwanger sind, produziert Ihr Körper das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin). Die hCG-Konzentration im Körper steigt in der Frühschwangerschaftsphase stetig an. Dieser Test kann schon winzige Mengen dieses Hormons in Ihrem Urin nachweisen. (Die Empfindlichkeit dieses Tests liegt bei 25 mIU/mL.)

3 Wann kann ich einen Test mit Clearblue Frühe Erkennung Digital durchführen?

Der Spiegel des Schwangerschaftshormons steigt in der Frühschwangerschaft rasch an und dieser Test kann bis zu 5 Tage vor dem Ausbleiben der Periode angewendet werden (dies entspricht 4 Tage vor Fälligkeit der Periode). Wenn Sie vor Fälligkeit der Periode testen und das Ergebnis „Nicht Schwanger“ erhalten, kann es sein, dass Sie trotzdem schwanger sind. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer klinischen Untersuchung mit Urinproben aus der Frühschwangerschaft:

Früheres Testen				
Anzahl der Tage vor Fälligkeit der Periode	-1	-2	-3	-4
% der schwangeren Frauen, die das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben	95 %	90 %	82 %	51 %

- Um den Fälligkeitstag Ihrer Periode zu ermitteln, berechnen Sie Ihre gewöhnliche Zykluslänge, indem Sie die Tage vom ersten Tag Ihrer Periode bis zum Tag Ihrer nächsten Periode zählen.
- Wenn Ihre Zyklen unregelmäßig sind, sollten Sie vom längsten Zyklus der letzten Monate ausgehen, bevor Sie testen.
- Wenn Sie ab dem Fälligkeitstag der Periode testen, können Sie den Test zu jeder Tageszeit durchführen. Wenn Sie früher testen, verwenden Sie hierfür Morgenurin. Nehmen Sie vor dem Test nicht übermäßig viel Flüssigkeit zu sich.
- Das das Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet und Sie trotzdem glauben, dass Sie schwanger sind, lesen Sie Frage 10.

4 Können Medikamente oder Erkrankungen mein Ergebnis beeinflussen?

- Lesen Sie vor der Durchführung eines Tests grundsätzlich die Anweisungen des Herstellers des Medikaments durch, das Sie gerade einnehmen.

- Fruchtbarkeitsfördernde Arzneimittel, die hCG enthalten, können zu irreführenden Ergebnissen führen. (Diese fruchtbarkeitsfördernden Arzneimittel werden üblicherweise injiziert. Wenn Sie zu früh nach der Behandlung testen, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird, obwohl Sie nicht schwanger sind.)

- Andere fruchtbarkeitsfördernde Mittel (z. B. Clomiphencitrat), Schmerzmittel und hormonelle Verhütungsmittel (z. B. Antibabypille) sollten keinen Einfluss auf das Ergebnis haben.
- Wenn Sie erst seit Kurzem keine hormonellen Verhütungsmittel mehr einnehmen oder wenn Sie fruchtbarkeitsfördernde Mittel wie Clomiphencitrat einnehmen, kann Ihr Zyklus unregelmäßig sein, sodass Sie möglicherweise zu früh testen.
- Wenn Sie bis vor Kurzem schwanger waren (auch wenn die Schwangerschaft nicht ausgetragen wurde), ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird, obwohl Sie nicht schwanger sind.
- Eileiterschwangerschaft, Zysten an den Eierstöcken, die Wechsellähre und einige sehr seltene Erkrankungen können zu irreführenden Ergebnissen führen.
- Wenn Sie das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben, kann sich evtl. später herausstellen, dass Sie nicht schwanger sind, da sich im Frühstadium ein natürlicher Abgang ereignen kann.

Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

5 Ich habe den Test durchgeführt, aber der Smart Countdown wurde nicht angezeigt. Was bedeutet das?

Der Test wurde nicht korrekt durchgeführt. Lesen Sie bitte den Abschnitt „Testfehler“ weiter unten.

6 Der Smart Countdown zählte viel schneller zurück als erwartet. Was bedeutet das?

Es kann vorkommen, dass das Ergebnis bereits nach 1 Minute angezeigt wird. In diesen Fällen werden die Smart Countdown-Segmente in schnellerer Folge angezeigt.

7 Der Smart Countdown hat begonnen, lief aber nicht bis zu Ende ab. Es wurde weder ein Ergebnis noch eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt. Was bedeutet das?

Der Test ist nicht korrekt abgelaufen. Lesen Sie bitte den Abschnitt „Testfehler“ weiter unten.

8 Ich habe den Test durchgeführt, aber im Display wird kein Ergebnis angezeigt. Was bedeutet das?

Das Ergebnis erscheint normalerweise innerhalb von 3 Minuten auf dem Display. Wenn kein Ergebnis angezeigt wird, lesen Sie bitte den Abschnitt „Testfehler“ weiter unten.

9 Mein Test hat ergeben, dass ich schwanger bin. Was soll ich tun?

Wenn das Ergebnis „Schwanger“ lautet, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen und mit ihm das weitere Vorgehen besprechen.

10 Mein Test hat ergeben, dass ich nicht schwanger bin. Was soll ich tun?

Es kann sein, dass Sie nicht schwanger sind oder die Konzentration des Schwangerschaftshormons noch zu niedrig ist, um es nachweisen zu können, oder dass Sie den Fälligkeitstag der Periode falsch berechnet haben.

- Wenn Sie früher getestet haben, testen Sie erneut, wenn Ihre Periode fällt ist.
- Wenn Ihre Periode überfällig ist, führen Sie nach drei Tagen einen weiteren Test durch. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Testfehler

Fehlersymbol „Buch“ – während des Tests ist ein Fehler aufgetreten. Es kann sein, dass:

- Die saugfähige Testspitze nicht nach unten gehalten oder das Teststäbchen nach Aufnahme des Urins nicht flach hingelegt wurde.
- Zu viel oder zu wenig Urin aufgenommen wurde.

Sie sollten den Test mit einem neuen Teststäbchen wiederholen. Halten Sie sich dabei genau an die Anweisungshinweise.

Fehler: kein Ergebnis

Der Test hat nicht ordnungsgemäß funktioniert. Möglicherweise wurden die Anweisungshinweise nicht genau befolgt. Sie müssen einen weiteren Test durchführen.

Halten Sie sich dabei genau an die Anweisungshinweise.

Entsorgung des Tests

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Teststäbchens die Batterie. Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Zur Entnahme der Batterie eine Münze in den Schlitz am Ende des Tests einsetzen und zum Aufbrechen der Rückseite des Teststäbchens drehen. Ist die Batterie nicht sichtbar, schieben Sie die Batteriehalterung in Pfeilrichtung heraus, um die Batterieentnahme zu vereinfachen.

Warnung: Die Batterien nicht auseinandernehmen, wiederaufladen oder ins Feuer werfen. Den Rest des Teststäbchens gemäß den geeigneten Recycling-Verfahren für Elektronikgeräte entsorgen. Elektronikgeräte nicht ins Feuer werfen.

Für den Selbsttest zu Hause. Ausschließlich zur Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik.

Nicht zur inneren Anwendung.

Nicht wiederverwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei 2 °C bis 30 °C aufbewahren.

Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur erwärmen lassen.

Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums anwenden.

Dieses Produkt ist mit einer Batterie ausgestattet.

Dieses Produkt ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.



0123

www.clearblue.com

Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00 – 16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.

DE 0800 589 4015 • AT 0800 070 359

Kostenlos aus dem Festnetz, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz können Kosten entstehen. Alle Anrufe werden aufgezeichnet und eventuell zur Qualitätskontrolle abgehört. Bitte halten Sie das Produkt und dessen Verpackungen bereit, inklusive der Folienverpackung, wenn Sie uns anrufen.

Dieses digitale IVD-Gerät erfüllt bezüglich Emissionen und Störfestigkeit die Anforderungen der Norm EN 61326-2-6:2006. Die beim elektronischen Instrument angewandten EMV-Gegenmaßnahmen bieten einen angemessenen Schutz vor den Auswirkungen von elektromagnetischen Störungen, die in einer häuslichen Umgebung auftreten können. Der folgende vorbeugende Warnhinweis bezieht sich auf Geräte, die die Norm EN 61326-2-6:2006 erfüllen.

a) Die Verwendung dieses Geräts in einer trockenen Umgebung kann, insbesondere in Anwesenheit von synthetischen Materialien (Kleidung und Teppiche aus Kunststofffasern usw.), zu schädlichen statischen Entladungen und somit zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

b) Dieses Gerät nicht in der Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Strahlung (z. B. Mobiltelefone) verwenden, da diese den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen können.

	Hersteller		Nicht wiederverwenden
	Batch-Code		Medizinisches Produkt für die <i>In-vitro</i> -Diagnostik
	Verfallsdatum		Temperaturbegrenzung 2 °C – 30 °C



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz.
Clearblue ist eine Marke von SPD.

© 2019 SPD. Alle Rechte vorbehalten.

2300534.03 03-2019